

Web 管理画面について

1.1 ソフトウェアを更新する

ご用意いただくものは以下となります：

- 1.LANCEGATE 一台
- 2.最新版ソフトウェアのAPKファイルを入れたUSB メモリー（例：
AIThermoApp_1.2.7.apk）

更新手順：

①「管理者画面」からアプリ一覧画面を呼び出す：

左図「管理者画面」の下部のナビゲーションバーの「○」をタップして、Android OS のホーム画面を表示します。

右図ホーム画面の下にある枠で囲まれている部分から上部へドラッグ&ドロップして、アプリ一覧画面（次のページの左図）を表示します。






②「資源管理器」（エクスプローラー）で APK ファイルを開く：

USB メモリーを製品の USB ポートに差し込んでください。

左図「アプリ一覧」の「資源管理器」をタップして、右上の図（Explorer 画面）の「USB」フォルダを開けてください。

右下の図のように、ソフトウェアの APK ファイルをタップしてください。

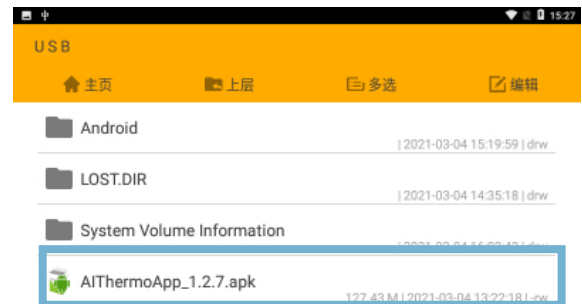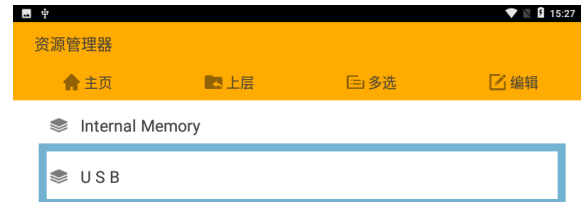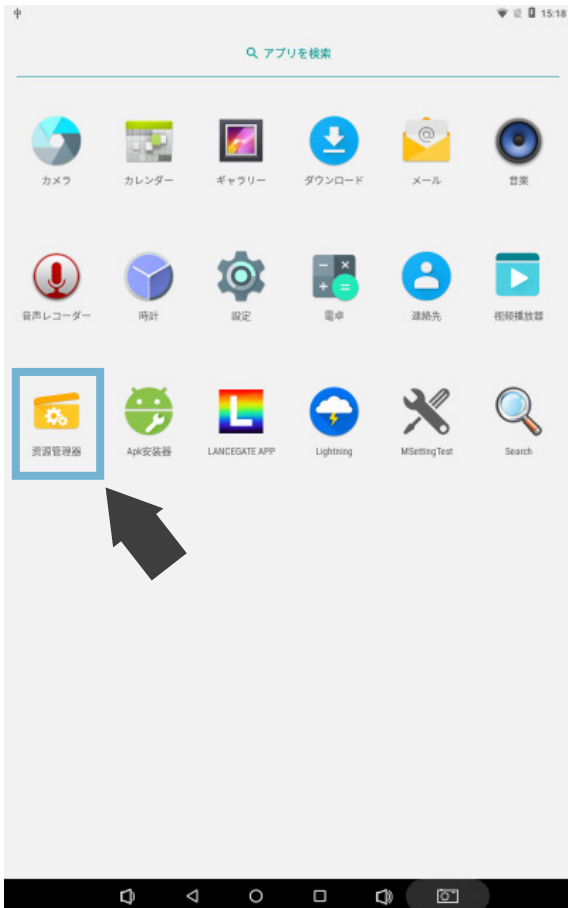

③アプリを更新：

右図の画面で、右下の

「インストール」を押すと、

ソフトウェアの更新が始まります。

インストール完了後、ソフトウェアが自動で起動します。



1.2 Wi-Fi に接続する

① タブレット設定を開く


左図のように、検温画面の「管理者画面」をタップして、「タブレット設定」をタップしてください。

右図のタブレット設定の「Wi-Fi」をタップしてください。



② Wi-Fi に接続


デバイス同士の接続が可能な Wi-Fi を選択して、パスワードを入力した後、「接続」をタップすれば、Wi-Fi の接続は完了です。

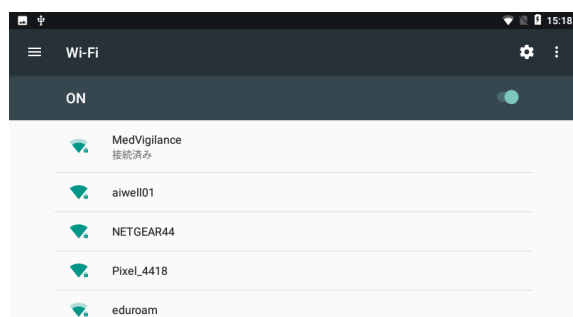

1.3 IP アドレスを調べる

- Wi-Fi に接続した後、検温画面に戻してください。
- 画面左下部にある Wi-Fi アイコンをタップしてください。
- 0-255 の数字 4 組をドットで繋いだ IP アドレスを確認し、メモしてください。

(例 : 192.168.1.168)

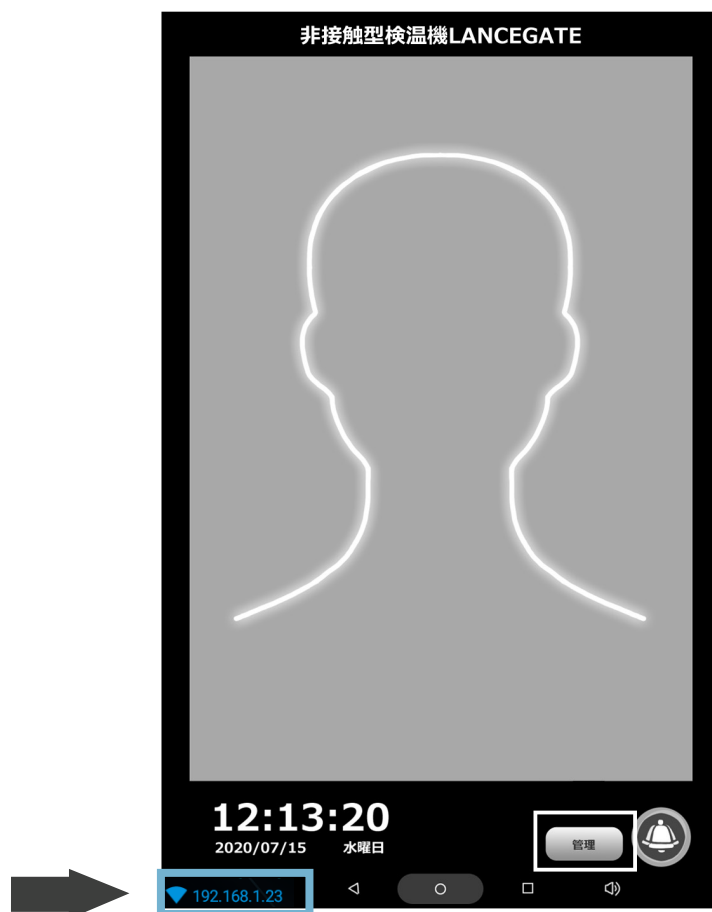

1.4 Web 管理画面にログインする


①ブラウザで Web 管理画面を開く

同 Wi-Fi に接続されているパソコンやタブレット型 PC のブラウザを開いて、アドレスバーに IP アドレス + 「:8080」の形で入力し、「Enter」キーを押してアクセスしてください。

(例 : 192.168.1.168:8080)



注:同時にログイン状態が維持できるのは5デバイスまでです。(1ブラウザ=1デバイス)
6つ目以降のデバイスに対し、下記のメッセージが表示されます:

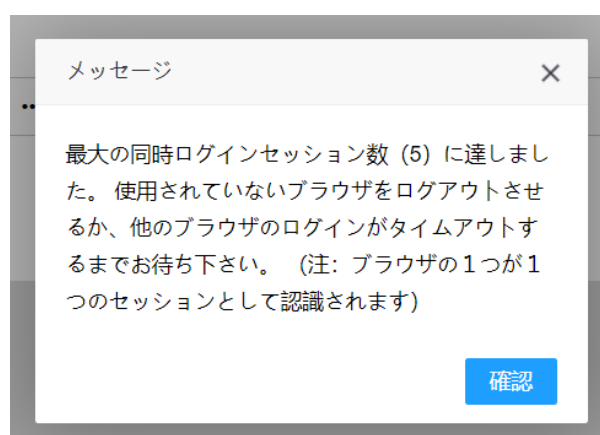

②ログインする

アクセスすると、「Lancegate Manager」のログイン画面が表示されます。パスワード（デフォルトでは「admin123456」）を入力し、「ログイン」ボタンを押下してください。



1.5 Web 管理画面の機能説明

1. 訪問履歴の基本説明：

① 検索機能（下図の水色枠）

開始日、終了日を空白にして、「検索」を押すと、全履歴が確認できます。

② 削除機能（下図の赤色枠）

単一の「削除」、「一括削除」と「すべてのログを削除」に分けられています。

・「削除」：各履歴の右側の「削除」ボタンを押すと、単一の履歴データが削除できます。

・「一括削除」：履歴左側のチェック欄でチェックした履歴を一括削除できます。

・「すべてのログを削除」：すべての履歴が削除できます。

③ Excel 出力機能（下図の緑色枠）

「Excel出力」を押すと、表示した履歴を一括でエクスポートされます（excelファイル）。

④ 顔写真の表示機能（下図の黒色枠）

被検温者（登録されている利用者、登録されていない訪問客を含む）が検温時の顔写真を表示できる。

（詳しくは「システム設定」を参照）

訪問履歴 システム設定

累計訪問回数 107回	検索結果数 107回	本日訪問回数 5回
累計体温異常回数 0回	検索結果の内、体温異常の回数 0回	本日体温異常回数 0回

開始日	終了日	全記録	検索	一括削除	すべての履歴を削除	Excel出力			
<input type="checkbox"/>	利用者番号	氏名	体温 (°C)	認証方法	記録時刻	顔写真	操作		
<input type="checkbox"/>	0	訪問客	36.1	顔認識	2021-04-01 11:31:26				
<input type="checkbox"/>	8	test	36.6	顔認識	2021-04-01 11:31:20				
<input type="checkbox"/>	0	訪問客	35.8	顔認識	2021-04-01 11:31:12				
<input type="checkbox"/>	0	訪問客	35.9	顔認識	2021-04-01 11:30:46				
<input type="checkbox"/>	8	test	36.1	顔認識	2021-04-01 11:30:15				
<input type="checkbox"/>	0	訪問客	36.2	顔認識	2021-03-29 14:34:28				
<input type="checkbox"/>	0	訪問客	36.5	顔認識	2021-03-29 11:19:58				
<input type="checkbox"/>	0	訪問客	36.2	顔認識	2021-03-29 11:19:57				
<input type="checkbox"/>	0	訪問客	36.3	顔認識	2021-03-29 11:19:56				
<input type="checkbox"/>	0	訪問客	36.1	顔認識	2021-03-29 11:18:26				

※ 図中の①は検索ボタン、②は一括削除/すべての履歴を削除/Excel出力ボタン、③はExcel出力ボタン、④は顔写真表示ボタンを指します。

注：異常人数（赤字で表示）は、検温設定の「警戒体温閾値」より高い体温が検出された人数の合計です。

1.5 Web 管理画面の機能説明

2. システム設定の機能説明 :

> 検温設定 (設定を変更したら、「保存」を押してください)

> 操作

> セキュリティ設定

① 検温設定

Web 管理画面の検温設定は LANCEGATE ソフトウェア上「検温設定」と同期されており、Web 管理画面の設定が変更されると、本体の設定も変更されます。

Web 管理画面の特有機能：「検温時に顔写真を撮る」スイッチ：

- ・ ON の場合：被検温者が検温時の顔写真を保存します。保存された顔写真は、Web 管理画面の「訪問履歴」で確認できます。
- ・ OFF の場合：顔写真を撮りません。

▼ 検温設定 (設定を変更したら、「保存」を押してください)

検温なレーションパターン 体温は正常です。 *度。 体温は正常です、*度。 (案内しない)

警戒体温閾値 (°C)

利用者情報を表示する長さ(秒)

警戒体温警報

スリープモード移行までの時間(秒)

スクリーンセーバー機能

マスク着用要請

訪問客を履歴に記録、表示

検温アプリへ自動移行までの時間 5分 3分 1分 30秒 移行しない

検温時に顔写真を撮る

保存

1.5 Web 管理画面の機能説明

2. システム設定の機能説明：

②操作



・ログアウト

ブラウザを手動でログアウトさせます。

※同時にログイン状態が維持できるのは5デバイスまでです。（注：1ブラウザ=1デバイス）


※ブラウザにおけるログイン状態の保持時間は「ログイン後の12時間まで」です。

ログインの12時間後に自動でタイムアウトし、その後再度ログインが必要となります。

・アプリ再起動


本体上で操作をしなくても、ブラウザで検温機のソフトウェアを再起動させることはできます。

③セキュリティ設定

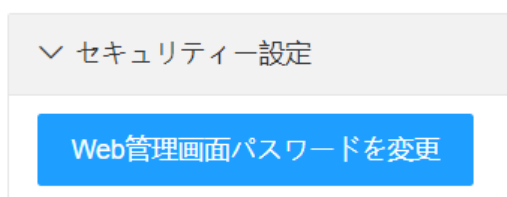

Web 管理画面のログインパスワードが変更できます。（パスワードの定期変更を推奨します。）

現在のパスワードは認証用に一回入力して、新しく設定したいパスワードを二回入力して、「保存」をクリックすればパスワードが変更されます。

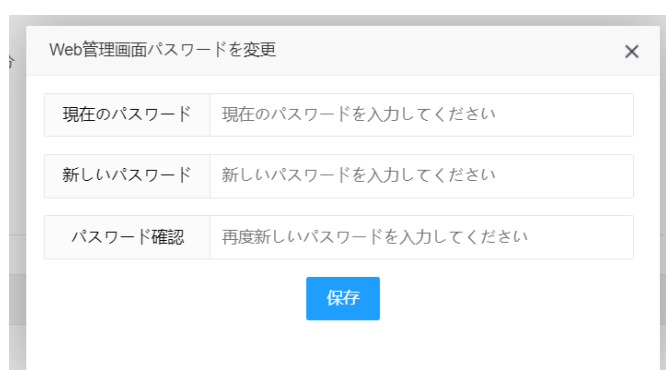A screenshot of a dialog box titled 'Web管理画面パスワードを変更' (Change Web Management Screen Password). It contains three input fields: '現在のパスワード' (Current Password) with the prompt '現在のパスワードを入力してください', '新しいパスワード' (New Password) with the prompt '新しいパスワードを入力してください', and 'パスワード確認' (Password Confirmation) with the prompt '再度新しいパスワードを入力してください'. A blue '保存' (Save) button is located at the bottom center.