

Web 管理画面について

1 ログインするための準備

① ソフトウェアを更新する


取扱い説明書（5.7.7）を参照し、オンライン或いはオフラインで最新版に更新してください。

② Wi-Fi に接続する

ローカルネットワークでデバイス間の通信ができる Wi-Fi に接続します。詳しい操作は取扱い説明書（5.8.1）を参照してください。

③ IP アドレスを調べる

- ・ Wi-Fi に接続した後、検温画面に戻してください。
- ・ 画面右下部にある Wi-Fi アイコンをタップするか、または QR コードをスキャンしてください。
- ・ 0-255 の数字 4 組をドットで繋いだ IP アドレスを確認し、メモしてください。（例：192.168.11.20）

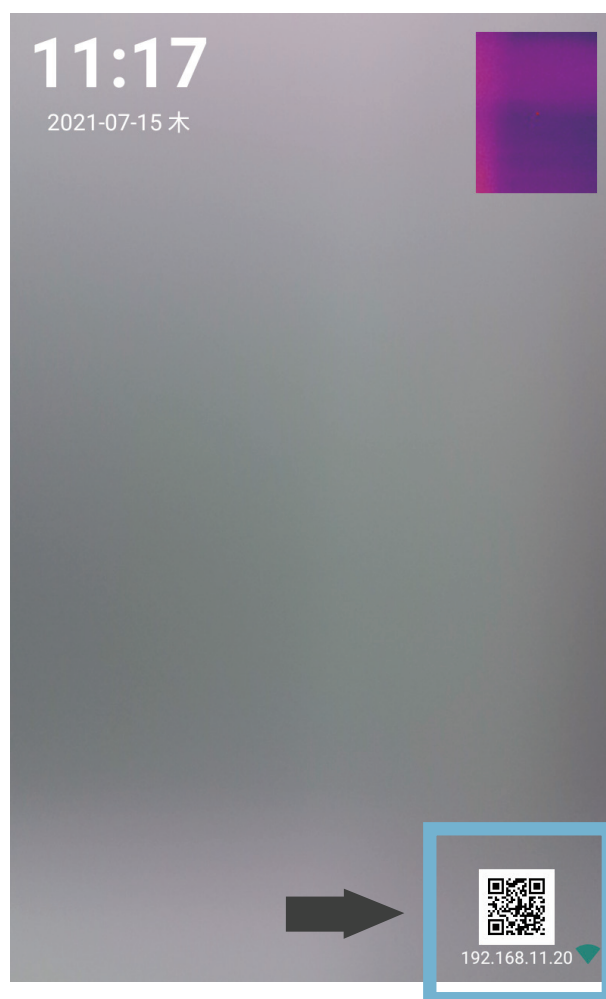

2 Web 管理画面にログインする

①ブラウザで Web 管理画面を開く


同 Wi-Fi に接続されているパソコンやタブレット型 PC のブラウザを開いて、アドレスバーに IP アドレス + 「:8080」の形で入力し、「Enter」キーを押してアクセスしてください。

(例 : 192.168.11.20:8080)



②ログインする

アクセスすると、「Web 管理画面」のログイン画面が表示されます。パスワード（デフォルトでは「admin123456」）を入力し、「ログイン」ボタンを押下してください。

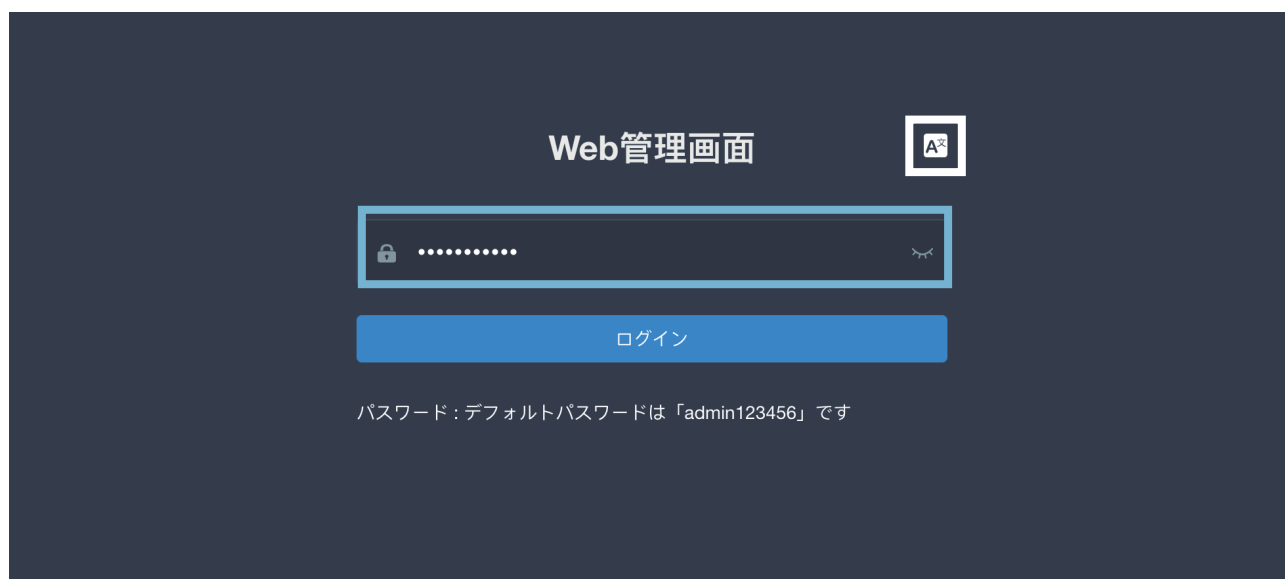

注 : ログイン画面から言語を変更できます (白枠)。ログインした後でも変更できます。

③ログインに関する注意事項


● Web 管理画面のログイン有効期限は5日間です。有効期間内ではブラウザは自動ログインします。

ただし、LANTHERMO ソフトウェアを再起動した場合、ログインが失効し、再度ログインする必要があります。再度ログインを必要とされる場合、下記のメッセージが表示されます：



●同時にログイン状態が維持できるのは5デバイスまでです。（1ブラウザ = 1デバイス）

6つ目以降のデバイスに対し、下記のメッセージが表示されます：

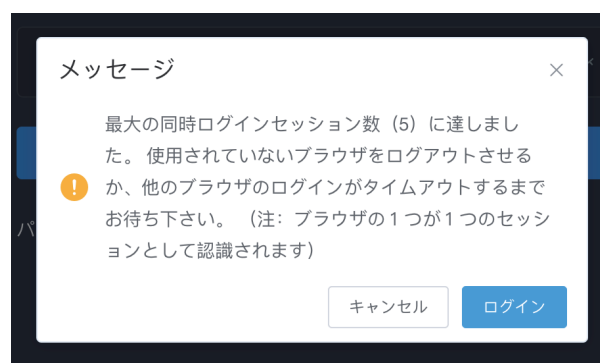

●ログインパスワードはLANTHERMOの管理者パスワードと連動しており、単独で変更する機能がありません。LANTHERMOの管理者パスワードを変更した場合、Web管理画面のログインパスワードは「admin+ 管理者パスワード」となります。

3 Web 管理画面の機能説明

1. 通行記録の機能説明：

① 検索機能

開始日、終了日を空白にして、「検索」を押すと、全記録が確認できます。
開始日時と終了日時両方選択すると、その区間内の記録が確認できます。
開始日時や終了日時を入力すると、その日の記録が確認できます。

② 削除機能

単一の「削除」、「複数削除」と「全件削除」に分けられています。

- ・「削除」：各記録の右側の「削除」ボタンを押すと、単一の記録データが削除できます。
- ・「複数削除」：記録左側のチェック欄でチェックした複数の記録を削除できます。当ページ的全検索結果を一括選択することも可能です。1ページに最大 250 件の結果が表示可能なため、一回で最大 250 件を削除可能です。
- ・「全件削除」：検索結果と関係なく、全ての通行記録を削除します。

③ 記録エクスポート機能

「エクスポート」を押すと、検索結果が一括でエクスポートされます（Excel ファイルとしてダウンロードします）。

④ 顔写真の表示機能

被検温者（登録されている利用者、登録されていない訪問客を含む）が検温時の顔写真を表示できる。

（詳しくは「システム設定」を参照）

通行記録

通行記録 顔認証設定 検温設定 ソフトウェア設定 システム設定

開始日時 終了日時 全記録

検索 エクスポート 複数削除 全件削除

	ユーザーID	ユーザー名前	体温 (°C)	通行時間	ステータス	顔写真	備考	操作
<input type="checkbox"/>	008	木村	37.2	2021-07-28 16:46:18	正常体温	表示		変更 削除
<input type="checkbox"/>	008	木村	37.5	2021-07-28 16:46:12	異常体温	表示		変更 削除

総計 2 件 10件/ページ 1 ページ目へ

2. 設定メニューの機能説明：

設定メニューのあらゆる設定は LANTHERMO と同期しています。

①顔認証設定（左図）

「複数利用者の顔認識」：

撮影範囲内の複数名の利用者に対して、同時に顔認識と検温を行う設定です。OFF の場合は 1 名のみ顔認識と検温を行います。

「未登録の方の場合、警告をしない」：

顔が登録されていない訪問客と認識されると、設定が ON の場合、一切警告しません；設定が OFF の場合、警告します。

「通行者の撮影をしない」：

OFF の場合、通行履歴に通行者の撮影画像は保存されます。

ON の場合、通行者を撮影しません。



②検温設定（右図）

「体温測定機能」：

利用者の体温を測定する機能です。

オンにすると、顔認証と同時に検温を行います。

「マスク着用要請」：

利用者のマスク未着用状態が検知された場合、着用要請の音声を流します。

「温度単位」：

摂氏度 (°C) と華氏度 (°F) が選択できます。

「適正体温の下限值」：

下限値を下回る低体温を検知した場合、異常体温と判定し、警告をします。


「適正体温の上限值」：

上限値を超える高体温を検知した場合、異常体温と判定し、警告をします。

③ソフトウェア設定

「スクリーンセーバー待ち時間（秒）」：

スクリーンセーバー待ち時間は必要に応じて調整できます。

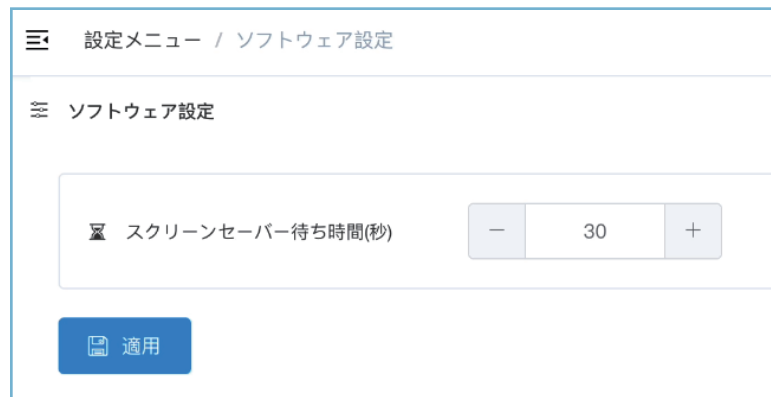

④システム設定

「システム音量」：

左にドラッグすると音量が小さくなります；

右にドラッグすると音量が大きくなります。

「画面の明るさ」：

左にドラッグすると画面が暗くなります；

右にドラッグすると画面が明るくなります。



3. その他機能紹介



●画面サイズを切替

Web 管理画面の表示画面を拡大させます。



●言語サイズを切替

「Default」「Medium」「Small」「Mini」が選択できます。



●言語を切替

日本語、英語、中国語が選択できます。



●ログアウト

ブラウザを手動でログアウトさせます。

<input type="checkbox"/>	ユーザーID	ユーザー名前	体温 (°C)	通行時間	ステータス	顔写真	備考	操作
<input type="checkbox"/>	009	木村	36.9	2021-07-14 11:22:52	正常体温	表示		変更 削除
<input checked="" type="checkbox"/>	007	cf	36.8	2021-07-14 11:14:07	正常体温	表示		変更 削除
<input type="checkbox"/>	007	cf	37.0	2021-07-13 17:58:17	正常体温	表示		変更 削除
<input type="checkbox"/>	007	cf	36.9	2021-07-13 17:48:24	正常体温	表示		変更 削除
<input type="checkbox"/>	007	cf	37.0	2021-07-13 17:48:07	正常体温	表示		変更 削除
<input type="checkbox"/>	007	cf	36.9	2021-07-13 17:47:49	正常体温	表示		変更 削除
<input type="checkbox"/>	007	cf	36.9	2021-07-13 17:47:15	正常体温	表示		変更 削除
<input type="checkbox"/>	007	cf	37.0	2021-07-13 17:47:07	正常体温	表示		変更 削除
<input type="checkbox"/>	007	cf	36.5	2021-07-13 17:35:47	正常体温	表示		変更 削除
<input type="checkbox"/>	007	cf	36.8	2021-07-13 17:18:30	正常体温	表示		変更 削除

●画面テーマのカスタマイズ

画面ボタンの色が選択できます。

「タグを表示」をオンにすると、画面左上に以下のタグが表示されます。



注：

検索結果が0件の場合、エクスポート、複数削除、全件削除ボタンが無効になります。



●備考機能

各通行記録に対して備考を追記することが可能です。

備考を入力するには、「操作」の「変更」を押します。

入力完了後、「確認」ボタンを押すと、備考の変更が完了します。

(画面上に「備考が変更されました」というメッセージが表示されます)

	ユーザーID	ユーザー名前	体温 (°C)	通行時間	ステータス	顔写真	備考	操作
<input type="checkbox"/>	008	木村	37.0	2021-07-28 16:59:30	正常体温	表示		変更 削除
<input checked="" type="checkbox"/>	008	木村	36.9	2021-07-28 16:51:21	正常体温	表示	ok	確認 削除
<input type="checkbox"/>	008	木村	36.9	2021-07-28 16:51:05	正常体温	表示		変更 削除
<input type="checkbox"/>	008	木村	36.9	2021-07-28 16:50:48	正常体温	表示		変更 削除
<input type="checkbox"/>	008	木村	37.7	2021-07-28 16:49:42	異常体温	表示		変更 削除
<input type="checkbox"/>	008	木村	37.6	2021-07-28 16:49:21	異常体温	表示		変更 削除
<input type="checkbox"/>	008	木村	37.5	2021-07-28 16:46:12	異常体温	表示		変更 削除

●新しい通行記録の提示

Web 管理画面にログインしている状態では、新しい通行記録があるとき、Web 画面の右上で通知ダイアログが表示されます。

メッセージ
新しい通行記録があります。ご確認ください。[ユーザー名前: 木村], [通行時間: 2021-07-28 16:51:21]。 確認

	ユーザーID	ユーザー名前	体温 (°C)	通行時間	ステータス	顔写真	備考	操作
<input type="checkbox"/>	008	木村	36.9	2021-07-28 16:51:05	正常体温	表示		変更 削除
<input type="checkbox"/>	008	木村	36.9	2021-07-28 16:50:48	正常体温	表示		変更 削除
<input type="checkbox"/>	008	木村	37.3	2021-07-28 16:49:49	正常体温	表示		変更 削除
<input type="checkbox"/>	008	木村	37.7	2021-07-28 16:49:42	異常体温	表示		変更 削除
<input type="checkbox"/>	008	木村	37.3	2021-07-28 16:49:36	正常体温	表示		変更 削除
<input type="checkbox"/>	008	木村	37.8	2021-07-28 16:49:26	異常体温	表示		変更 削除
<input type="checkbox"/>	008	木村	37.6	2021-07-28 16:49:21	異常体温	表示		変更 削除
<input type="checkbox"/>	008	木村	37.2	2021-07-28 16:49:13	正常体温	表示		変更 削除
<input type="checkbox"/>	008	木村	37.1	2021-07-28 16:49:06	正常体温	表示		変更 削除